

## **Memo Comai ®**

Med Memo Comai® kan användaren i högre grad självständigt klara sin vardagssituation i arbetslivet, i studiesituationen och på fritiden, vilket leder till en förbättrad livssituation. Detta tjänar både användaren och samhället på. Framst vänder sig produkten till personer med kognitiva funktionsnedsättningar.

- Memo Comai® är ett mobilt tankestöd för personer med kognitiva funktionsnedsättningar – ett hjälpmedel för att skapa struktur i vardagen.
- Interaktiv återföring kan ske via SMS till anhöriga, personal, arbetsgivare, etc. när användaren har utfört och bekräftat en aktivitet.
- Memo Comai® är lättillgänglig eftersom tjänsten är kopplad till och kan användas med hjälp av en vanlig mobiltelefon som är kompatibel med Memo Comai och PC med internetanslutning.
- Informationen i kalendern sänds automatiskt till mobiltelefonen där påminnelsen om aktiviteten kommer upp i bilder/symboler och/eller text. En ljudsignal ljuder för att ytterligare göra användaren uppmärksam.


### **Hur fungerar Memo Comai ®?**

Memo Comai® är en totallösning för integration mellan användare och handledare. Tekniskt sett består systemet av en SMS-server som kommunicerar med mobiltelefoner. Meddelanden hanteras mellan PC/webbläsare och mobiltelefon i dubbelriktad kommunikation. Systemet är inte beroende av specifika mobiltelefonoperatörer. Varje enhet/komponent är självgående i varje delsystem.


### **Hur använder jag Memo Comai ®?**

Användaren lägger själv eller tillsammans med handledaren in händelser, aktiviteter och påminnelser i PC:ns kalender. Kalendern är mycket lättanvänd och pedagogisk. Varje moment som ska göras visas stegvis, det gör kalendern enkel att använda (se figur nedan)


Steg 1. Val av dag

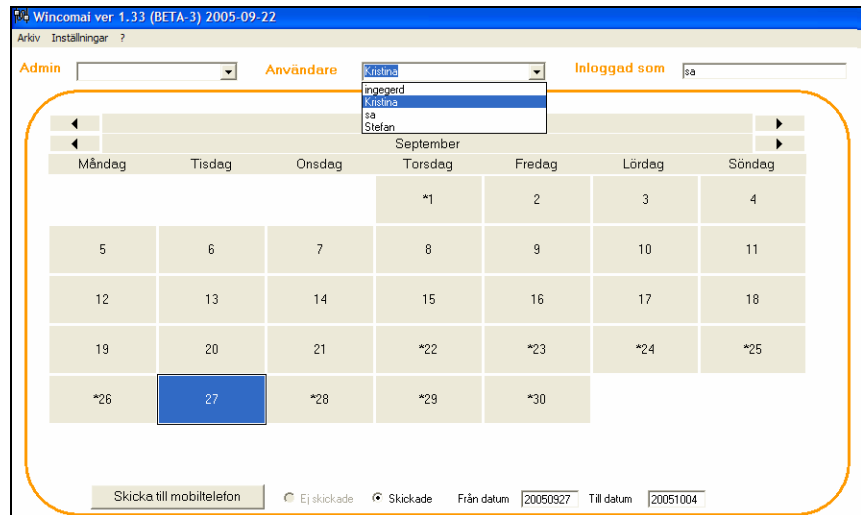

Steg 2. Val av tid

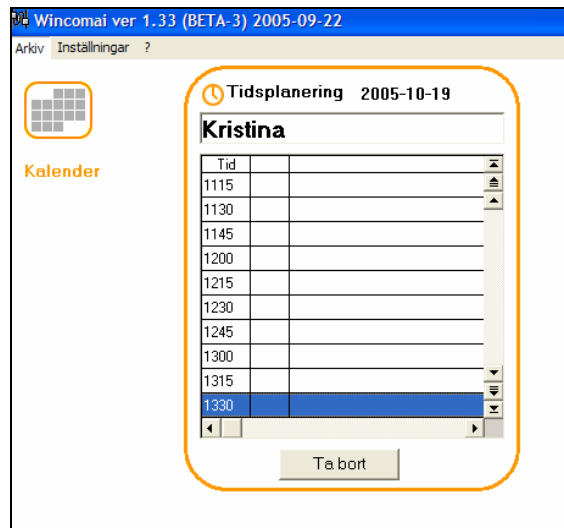

Steg 3. Val av funktion

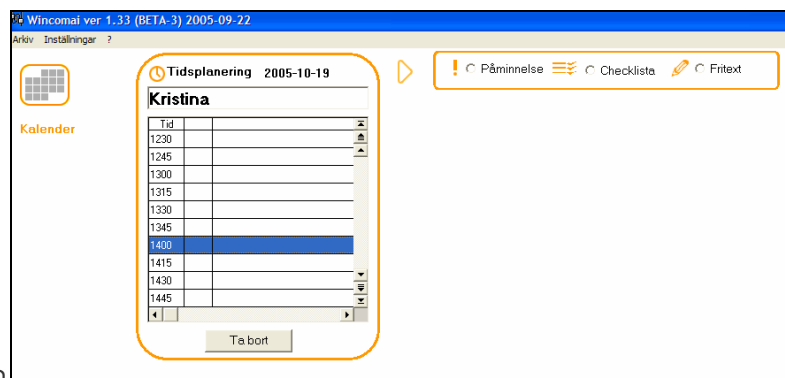

Det finns tre olika funktioner i Memo Comai® . Dessa tre funktioner är påminnelsefunktion, Checklistefunktion samt fritextfunktion.

### 1. Påminnelsefunktion

Påminnelse funktionen använder bilder och ljudsignal. En signal ljuder som uppmärksammar användaren. Vid påminnelsen kommer det, i mobiltelefonen, fram en bild samt den text som användaren har skrivit in t.ex. ta en paus. Användaren bekräftar att hon/han tar medicinen och det går en kvittens till en annan mobiltelefon när användaren ***inte eller har*** tagit medicinen. Användaren ställer in om det ska vara larm eller kvittens vid varje enskild aktivitet.

Så här ser det ut när påminnelsen aktualiseras i mobiltelefonen




Då det är viktigt att ha bilder som är anpassade för brukarna har Comai® särskilt tagit fram bilder som kan användas som ett kognitivt stöd. Nedanstående bilder är exempel som finns i Memo Comai®. Dessa bilder kommer fram i mobiltelefonen vid påminnelse.



## 2. Checklistefunktion

Används när det är flera moment som ska utföras. I mobiltelefonen visas listan. Användaren ställer in om det ska vara larm eller kvittens vid varje aktivitet

PC:ns kalender

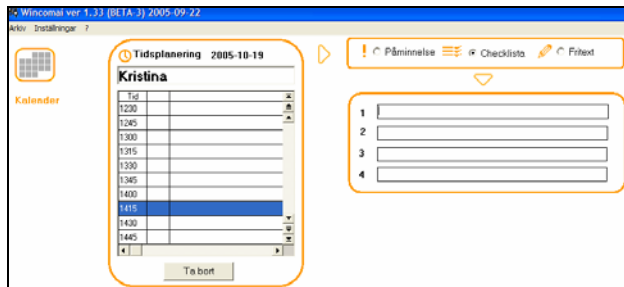


Så här ser det ut när checklistan aktualiseras i mobiltelefonen



## 3. Fritextfunktion

Fritextfunktionen använder du när du skriver mycket text. I mobiltelefonen visar sig den text som du har skrivit in. Användaren ställer in om det ska vara larm eller kvittens vid varje aktivitet.

PC:ns kalender

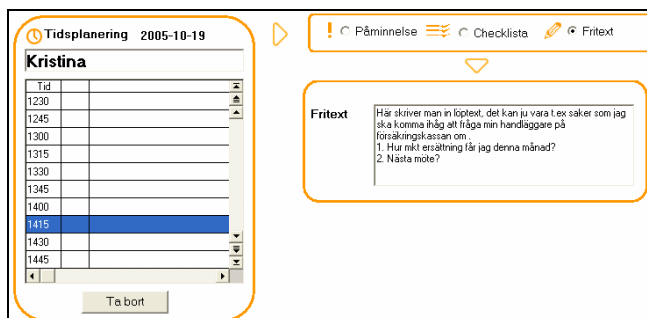

Så här ser det ut när fritexten aktualiseras i mobiltelefonen



Kalenderlista i mobiltelefon vyn

- Varje dag har sin unika färg t.ex. måndag grönt, tisdag blå, onsdag vit osv.
- Dagen visas högst upp i fältet tillsammans samt dagens datum och år.
- Aktiviteten står skriven vid aktuell tid tillsammans med en symbol för funktion. Du rullar med joysticken upp och ner mellan de olika aktiviteterna och tiderna. Den aktuella raden blir upplyst och har en svart ram.
- Påminnelse som är inlagd visas som ett utropstecken, checklista visas som en punktlista och fritext med en penna.



**Hur börjar jag använda Memo Comai®?**

Du behöver ha en mobiltelefon som är kompatibel till Memo Comai och ett telefon abonnemang hos en valfri leverantör.

**Vad får jag om jag köper Memo Comai®?**

Produkten Memo Comai® innehåller följande:

- Mjukvara på en CD som installeras i PC.
- Minneskort som installeras i mobiltelefon som är kompatibel.
- Manual för Memo Comai®.

- Support som du kan kontakta enligt instruktion på hemsidan [www.comai.se](http://www.comai.se)
- Uppdatering av aktuell version som sker antingen via återsändning av minneskortet till Comai och/eller uppdatering via mail/webbb.

**Teknisk kravspecifikation**

PC:ns operativsystem måste vara Microsoft Windows 2000, XP eller NT. PC:n ska vara uppkopplad till Internet för att det ska vara möjligt att sända SMS/MMS.